

PROCEDURE ALLEGRO DE

1 – Observer le modèle pour déterminer l'axe d'insertion le plus favorable. Monter en cire, les moignons.

2 – Créer un boîte ou logement dans la cire pour recevoir la partie plane du mâle. Avec le mandrin, placer la partie plane du mâle dans la logette aussi bas que possible sans empiéter sur la gencive.

3 – Il est recommandé de faire un fraisage ou appui lingual pour améliorer la rétention et renforcer les attachements.

4 – Terminer le travail en cire, couler et finir les couronnes ou bridge. Les couronnes devraient être coulées en alliage dur. Utiliser uniquement des billes de verre pour sabler et retailer les parties mâles des attachements. Les éléments peuvent être polis avec une brosse Robinson rouge. Vérifier la rétention avec une partie femelle de faible friction.

PARTIE CLINIQUE :

1 – Essayer les couronnes ou bridge.

2 – Prendre une empreinte avec les couronnes en place pour créer un nouveau modèle.

3 – Retourner l'empreinte ou le modèle au prothésiste dentaire avec les instructions.

PHASE 1 :

1 - Fabriquer et insérer des dies dans les couronnes.


2 – Mettre en articulation le nouveau maître modèle et vérifier si besoin.

3 – Placer

4 – Couler et finir le partiel.

5 – Insérer la gaine femelle dans le boîtier métal et fixer les boîtiers avec de la résine auto polymérisable. Assurez-vous que les femelles sortent parallèles avant de solidariser le tout avec de la résine.

6 – Retourner les couronnes ou bridge ou partiel au dentiste pour l'essayage final avant le montage des dents.

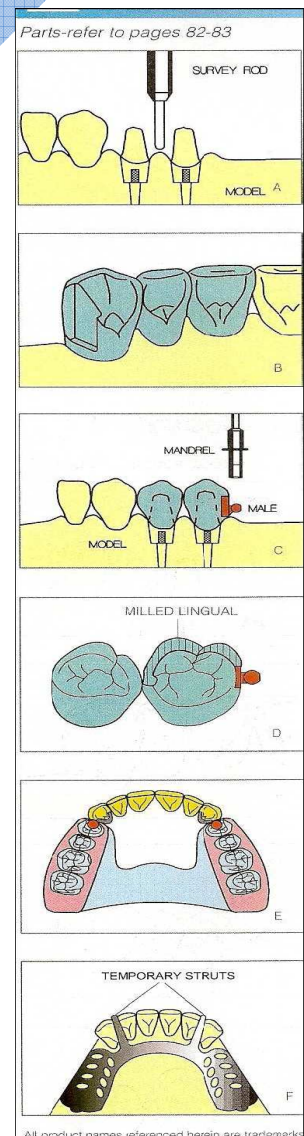


PHASE 2 :

- 1 – Essai des couronnes ou bridge ou partiel. Vérifier que le travail sur le partiel et les attachements soient complètement placés.
- 2 – Retourner le modèle au prothésiste en y insérant vos remarques.

PHASE 3 :


Parts-refer to pages 82-83

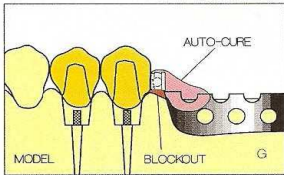

- 1 – Placer les dents et retourner au dentiste.


PHASE 4 CLINIQUE :

- 1 – Vérifier l'occlusion. Retourner au prothésiste.

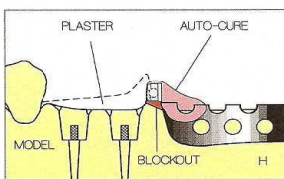

PHASE 5 TECHNIQUE :

- 1 – Enlever les couronnes. Enlever l'armature avec le montage des dents en cire. Remplir les éléments femelles avec une fine pellicule de plâtre. Faire une clé vestibulaire avec du plâtre ou silicone. Mettre de la résine sur la selle et ébouillanter.

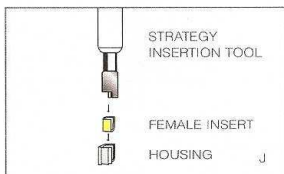

PHASE 6 CLINIQUE :

- Essuyage. Vérifier tout. Sceller les couronnes ou bridge. Utiliser la rotation souhaitée pour les parties femelles.