


## CAVALIERS ACKERMANN

Pour vos prothèses partielles ou hybrides. Avec ou sans mouvement vertical

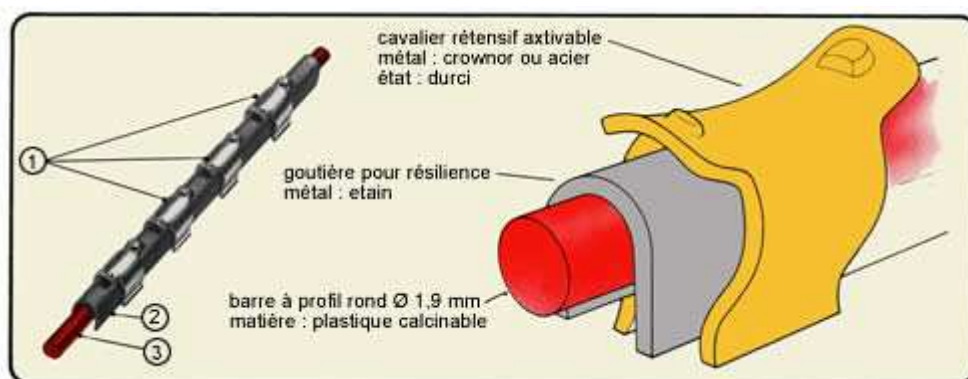

### Technique de montage :

- 1) Préparer les plateaux à tenons radiculaires en cire.
- 2) A l'aide du bec benzène, réchauffer légèrement la barre.
- 3) Appliquer la barre (3) ainsi ramollie, de plateau à plateau en suivant les crêtes alvéolaires.
- 4) Maintenir la barre quelques secondes dans sa position afin d'éviter toutes déformations.
- 5) Noyer les deux extrémités de la barre dans deux chapes en cire et ainsi on procédera à la coulée.
- 6) Faire votre montage en tenant compte de l'emplacement de votre barre.
- 7) Prendre une clé en plâtre de la partie vestibulaire de votre montage, selon la configuration de la muqueuse.
- 8) Contrôler la bonne position des dents.
- 9) Ajuster la gouttière en étain (2) sur toute la surface de la barre.
- 10) Ecarter doucement les cavaliers à l'aide de pinces.
- 11) Poser les cavaliers (1) sur la barre recouverte de la gouttière en étain. Il faut que les cavaliers rentrent et sortent librement sur la barre.
- 12) Finir le montage en cire.
- 13) A la mise en moufle, avant de presser la résine, mettre un peu de plâtre sur les extrémités des cavaliers.
- 14) Après grattage de l'appareil, il y aura seulement lieu de dégager les bords des cavaliers et à resserrer ces derniers.

