

# Sodimed - Alliages & Fournitures Dentaires -

☎ 04.90.85.29.00 📄 04.90.85.49.62

[service.commande@sodimed.com](mailto:service.commande@sodimed.com)

## Allegro OD,

### Procédures préliminaires pour les attachements Allegro

**Phase 1:** Respecter scrupuleusement les différentes étapes afin d'obtenir le meilleur résultat.

#### Phase 2: TECHNIQUE

##### Allegro,

1. Ajuster le pivot Mooser et créer un plateau en cire (Richmond) . Utiliser le(s) mâle(s) Allegro OD et vérifier l'axe d'insertion. En cas d'utilisation, de plusieurs attachements, n'hésitez pas à utiliser la tige à paralléliser.
2. Couler en alliage dur. Gratter et polir tout en faisant attention de ne pas polir la partie rétentive du mâle.

#### Phase 2: CLINIQUE

1. Le travail, une fois terminé devra faire l'objet d'une nouvelle empreinte. Il se peut que de petits trous apparaissent lors de la prise d'empreinte, de ce fait ,veuillez placer de la résine autour du mâle.

ALTERNATIVE: L'attachement peut être scellé en bouche. Une empreinte est prise. Les boîtiers métal (analogues) sont placés dans l'empreinte avant de faire un nouveau maître modèle.

#### Phase 3: TECHNIQUE

1. Appliquer une petite couche de Vaseline sur le nouveau maître modèle.

#### Phase 4: CLINIQUE

1. Essayer le montage or prendre un nouvel enregistrement si nécessaire

#### Phase 5: TECHNIQUE

1. Une fois le montage validé, enlevé la cire (ébullianter)
2. Placer le spacer autour du mâle (D). Mettre la gaine verte dans le boîtier métal en utilisant si besoin l'outil prévu à cet effet et l'insérer sur le mâle.
3. Utiliser de la résine acrylique pour insérer les boîtiers métal dans l'intrados de la prothèse

#### Phase 6: CLINIQUE

1. Mettre en place la prothèse et vérifier l'occlusion.
  2. Informer le patient sur l'hygiène
- Noter la taille de l'attachement

#### Contrôle de la rétention





1. Le code couleur

Du moins vers le plus rétentif :

Vert, Rouge, Jaune, Bleu

**Fournisseur et Copyright : Attachments International (CA-USA)**

**Contrat d'exclusivité : Sodimed - Attachments International**

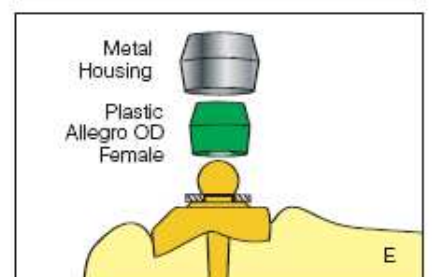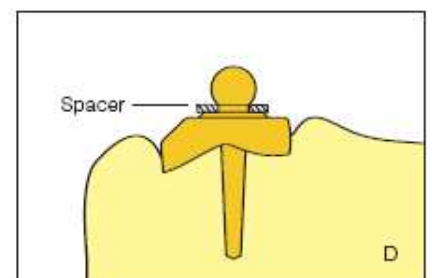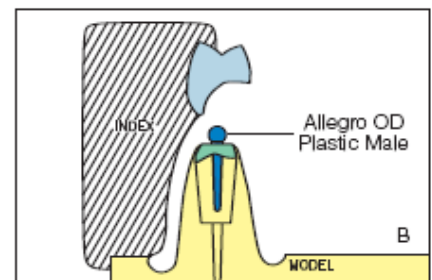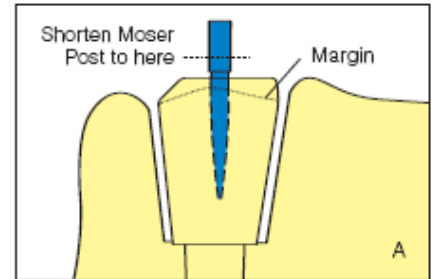

6, Avenue de la Foire B.P. 109 - 84001 AVIGNON CEDEX 1

Siret: 315 637 041 00015 - APE: 514 N – TVA Intra : 45 315 637 041 - Capital : 7622,45 €