




Attachements calcinables


Attachement Vertical Calcinable MICRO

Patrice à sphère: Utilisable en différents projets
Coiffe Élastique: interchangeable à rétention variable

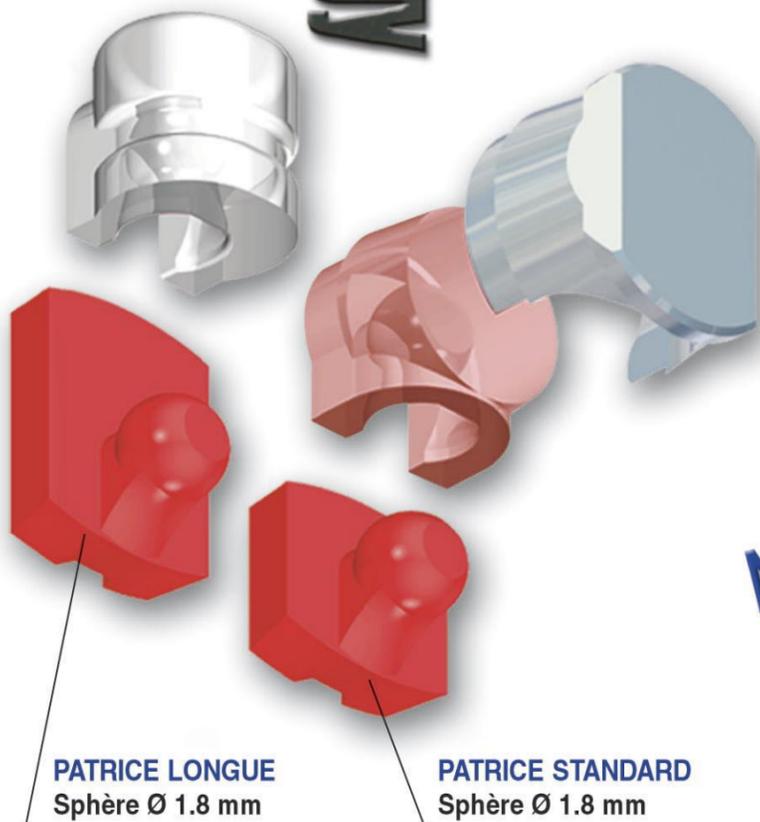


COIFFES

Blanche • Rétention Standard
Rose • Rétention Soft
Jaune • Rétention Extra Soft
Noire • Economique pour travail

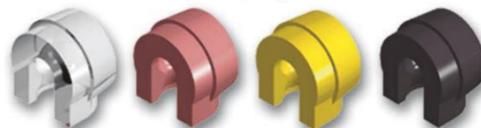


LOGEMENT INOX
pour souder ou
pour coller

POSITIONNEUR
STRATEGY
pour positionner
correctement le logement
sur le squelette

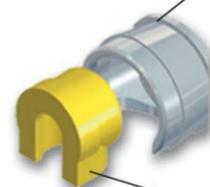

NOUVEAU



RENFORT DE LA SPHÈRE

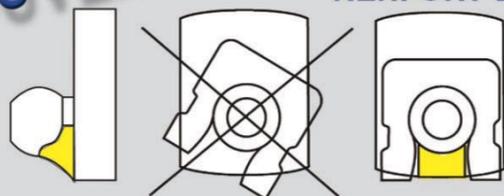



- Refroidissement du métal plus homogène.
- Nervure de renfort de la sphère.
- Guide d'alignement de la coiffe.

PATRICE LONGUE
Sphère Ø 1.8 mm

PATRICE STANDARD
Sphère Ø 1.8 mm

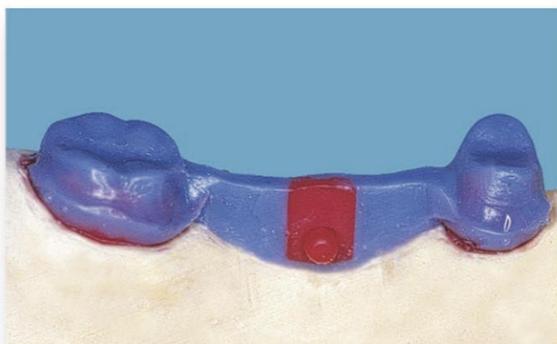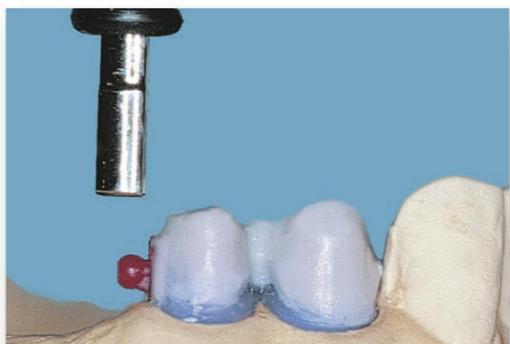

Option = STEADY

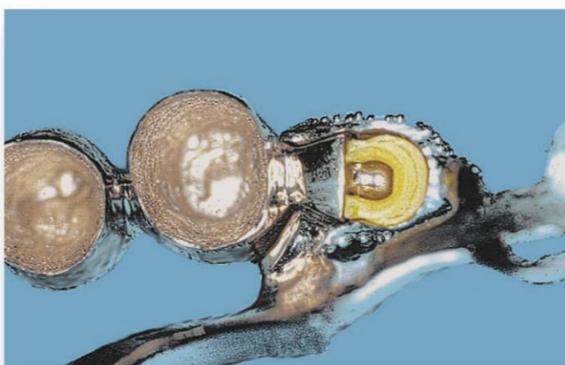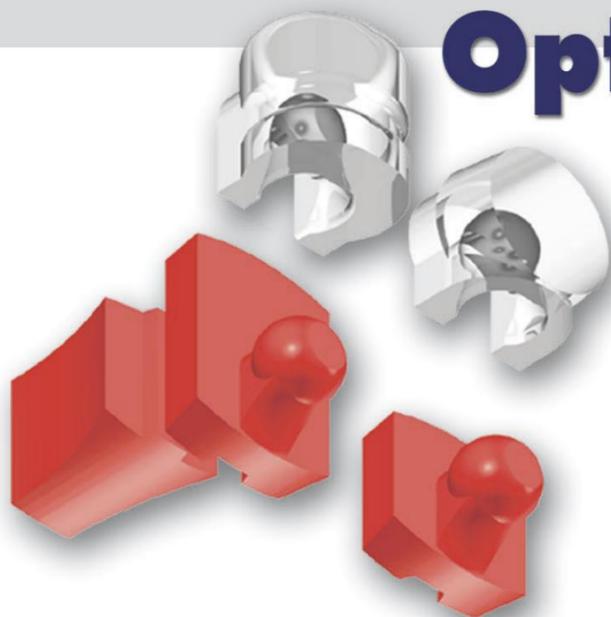


OUTIL D'INSERTION
DES COIFFES

Instruments


CLÉ POUR
PARALLÉLISEUR



Steady

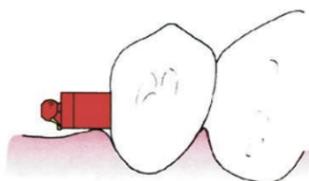

Steady + Patrice Standard

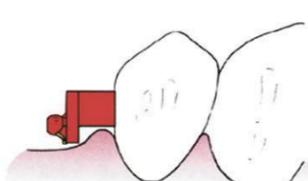

Steady + Patrice Longue

PATENTED BY


RHEIN83 Srl

Via E. Zago, 10 - 40128 (Bologna) Italy
Tel. (+39) 051 244510 - (+39) 051 244396
Fax (+39) 051 245238
www.rhein83.com e-mail: info@rhein83.com


CE 0434



Attachement recommandé en prothèse Mixte

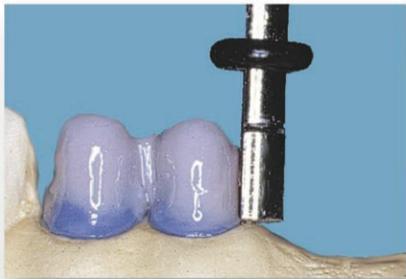

Insérer la patrice à sphère dans la clé. En fin de course, bloquer la clé contre le modèle et fixer l'attachement à la maquette en cire

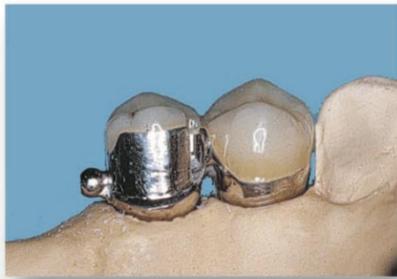


Couronnes avec un attachement à sphère, fraisage terminé et poli



Coiffe rétentive insérée sur la sphère. Modèle ciré, attention à ne pas mettre de cire sur la coiffe, avant la duplication



Modèle dupliqué en revêtement avec la reproduction de la coiffe

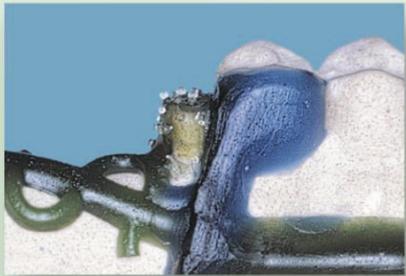

Format de la coiffe recouvert de cire (mm. 0.50). Squeletté modelé en cire



Coulée terminée. Insérer la coiffe avec l'instrument d'insertion




Squeletté terminé, assemblé sur le modèle




Prothèse terminée

Option = STEADY


OT STRATEGY + STEADY = Plus de stabilité, sans contournement fraisé

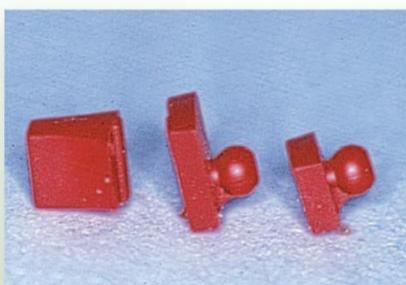

Patrice à sphère et Steady calcinable, à coller sur la patrice (standard ou longue)

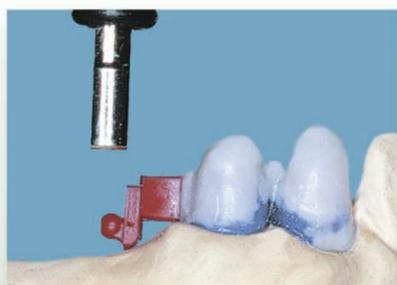

Patrice = Longue + Steady montée alignée. La longueur du Steady doit être évaluée pour chaque cas

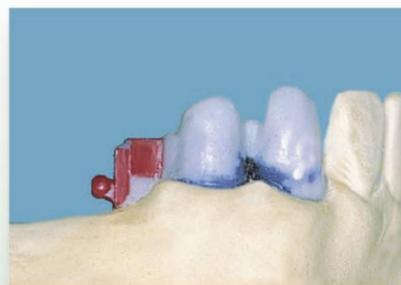

Modelage de l'attachement terminé en cire



Couronnes et attachement terminés




Couronnes et Steady, préparés pour dupliquer avec la coiffe insérée sur la sphère



Reproduction du modèle en revêtement



Modelage du squeletté

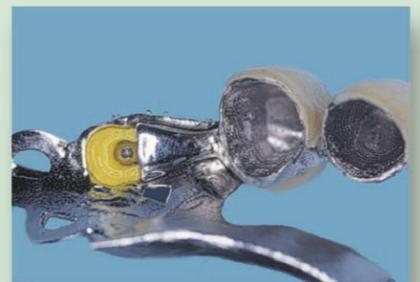

Prothèse terminée: le steady, remplace le contournement fraisé

COURS THEORIQUES - PRATIQUES

Tampon du revendeur

PATENTED BY

RHEIN83® Srl