

L'élaboration de la glissière fricative: PRECI-VERTIX P



1. Le positionnement parallèle à l'axe d'insertion



2. L'angulation de 45° peut être adaptée individuellement. La partie mâle peut être raccourcie jusqu'à 3 mm.



3. Remarquez l'adaptation passive basale selon le relief de la crête.



4. La partie femelle jaune raccourcie en fonction de la longueur de la partie mâle complète celle-ci pour le duplicata.



5. La prolongation vers le modèle sera réalisée avec de la cire de dépouille.



6. Ainsi vous obtenez un duplicata parfait.



7-8. La glissière PRECI-VERTIX est totalement enrobée de cire (0,3 mm d'épaisseur).



9. Après la mise en place, la partie femelle plastique...



10. ...restera dans sa logette sablée et non-polie.



11-12. La prothèse terminée. Il reste uniquement à raccourcir et à arrondir légèrement les parties mâles.

